	FICHE TECHNIQUE	NH-FT-022
	MANIPULATION DU CYCLEUR HOME CHOICE BAXTER	
	Version 01 du 10/08/2016	
page 1/2		
Entité émettrice : POLE MEDECINE D'ORGANES ET CANCEROLOGIE\Néphrologie-hémodialyse		

PREPARATION DU MATERIEL

Pour le plan de travail

- Produit détergent-désinfectant
- Chiffonnette


Pour le soin

- 1 set de ligne Home-Choice (4 ou 8 branches selon le nombre de poches à connecter)
- Les poches de dialysat selon la prescription
- Si la solution prescrite est du **Physioneal®**, casser les canules sécables qui séparent les deux compartiments des poches puis les accrocher sur le pied à perfusion pour que le mélange se fasse.
- 1 coquille bétadinée
- 1 bouchon bétadiné
- 2 masques (soignant et personne soignée)
- 1 bidon de récupération du dialysat drainé
- 1 flacon de SHA

TECHNIQUE

Installation du cycleur

- Nettoyer le plan de travail avec la chiffonnette imbibée de détergent-désinfectant. Laisser sécher.
- Brancher le cycleur sur une prise reliée à la terre
- Contrôler que la disquette est bien insérée dans son logement à gauche de la façade de l'appareil
- Le mettre sous tension en appuyant sur l'interrupteur situé à droite au dos de l'appareil
- Installer une poche sur la partie réchauffeur du cycleur
- Le message **VERT POUR DEMARRER** s'affiche à l'écran
- Appuyer sur la touche verte
- Le message **INSTALLER LES LIGNES** s'affiche à l'écran
- Ouvrir l'emballage de la ligne et fermer tous les clamps.
- Ouvrir la porte en façade de l'appareil et y introduire la cassette de la ligne.
- Refermer la porte en prenant garde de ne pas pincer de ligne.
- Installer le présentoir bleu grâce au dispositif prévu sur la porte de l'appareil
- Relier la ligne de drainage au bidon.
- Appuyer sur la touche verte. Le message **TEST AUTOMATIQUE** s'affiche à l'écran.
- Quand cette phase est terminée, le message **CONNECTER LES POCHES** s'affiche à l'écran.
- Mettre un masque (IDE et patient)
- Effectuer une hygiène des mains par lavage simple (15 secondes de savonnage – Fiche 2-01) ou avec la solution hydro-alcoolique (2 pressions et 30 secondes de friction – fiche 2-04)

	FICHE TECHNIQUE	NH-FT-022
	MANIPULATION DU CYCLEUR HOME CHOICE BAXTER	
	Version 01 du 10/08/2016	
page 2/2		
Entité émettrice : POLE MEDECINE D'ORGANES ET CANCEROLOGIE\Néphrologie-hémodialyse		

- Connecter la ligne au différentes poches selon la prescription médicale en commençant par la poche placée sur le réchauffeur (clamp rouge)
- Mettre les poches de stock sur les clamps blancs et la poche de dernière injection sur le clamp bleu.
- Appuyer sur la touche verte. Le message **AMORÇAGE DES LIGNES** s'affiche à l'écran.
- Le temps d'amorçage est de 10mn.
- Le message **CONNECTER-VOUS SVP** en alternance avec **VERIFIER LIGNE PATIENT** s'affiche à l'écran.

Branchement du patient

- Sortir le cathéter des vêtements du patient
- Mettre un masque (IDE et patient)
- Effectuer une hygiène des mains par lavage simple (15 secondes de savonnage – Fiche 2-01) ou avec la solution hydro-alcoolique (2 pressions et 30 secondes de friction – fiche 2-04)
- Saisir la ligne patient sur le présentoir du cycleur et la connecter au cathéter du patient.
- Ouvrir le clamp intégré du cathéter du patient
- Appuyer sur la touche verte
- Le message **DRAINAGE INITIAL** s'affiche à l'écran.

Si le patient est ventre vide lors du branchement

Le cycleur passera automatiquement en injection après contrôle de présence de dialysat dans le péritoine.

CYCLE DE VALIDATION		
Rédaction	Vérification	Approbation
<i>Christophe GREGOIRE, Thierry LOBBEDEZ</i> Infirmier(e) (IDE) - CHU\POLE MEDECINE D'ORGANES ET CANCEROLOGIE\Néphrologie-Hémodialyse, Chef de Service - CHU\POLE MEDECINE D'ORGANES ET CANCEROLOGIE\Néphrologie-Hémodialyse 10/08/2016 12:22:10, 10/08/2016 15:07:30	<i>Thierry LOBBEDEZ</i> Chef de Service - CHU\POLE MEDECINE D'ORGANES ET CANCEROLOGIE\Néphrologie-Hémodialyse 10/08/2016 15:12:46	<i>Brigitte COURTOIS (par Caroline SAINT)</i> Directeur - CHU\DIRECTION QUALITE ET DROITS DES PATIENTS 10/08/2016 15:40:06