	FICHE TECHNIQUE	NH-FT-023
	MANIPULATION DE DOUBLE POCHE BAXTER	Version 01 du 10/08/2016
		page 1/2
Entité émettrice : POLE MEDECINE D'ORGANES ET CANCEROLOGIE\Néphrologie-hémodialyse		

PREPARATION DU MATERIEL

Pour le plan de travail


- Produit détergent-désinfectant
- chiffonnette

Pour le soin

- 2 masques (soignant et personne soignée)
- 1 flacon de SHA
- 1 pied à perfusion
- 1 double poche neuve préalablement chauffée et pesée avec son emballage
- 2 clamps bleus à bec court
- 1 coquille bétadinée
- 1 bouchon bétadiné

TECHNIQUE

- Noter les informations sur le cahier de suivi de DPCA
- Nettoyer le plan de travail avec la chiffonnette imbibée de détergent-désinfectant. Laisser sécher.
- Mettre un masque (IDE et personne soignée)
- Effectuer une hygiène des mains par lavage simple (15 secondes de savaonnage – Fiche 2-01) ou avec la solution hydro-alcoolique (2 pressions et 30 secondes de friction – fiche 2-04)
- Ouvrir l'emballage de la double poche
- Installer la poche sur le pied à perfusion :
 - Fixer la poche sur le pied à perfusion
 - Décoller les poches et les lignes les unes des autres
 - Installer le Y de façon à ce qu'il ne traîne pas au sol
- Ouvrir l'emballage de la coquille bétadinée
- Sortir le cathéter des vêtements du patient
- Effectuer une hygiène des mains avec la solution hydro-alcoolique (2 pressions et 30 secondes de friction – fiche 2-04)
- Oter la capsule colorée de la poche
- Oter le bouchon bétadiné de la ligne patient
- Connecter la ligne patient avec le Y de la ligne de poche
- Poser la coquille bétadinée sur la connexion en la cliquant et en la tournant de façon bien imbiber la connexion de Bétadine®.
- Poser la poche de drainage au sol sur une protection.
- Ouvrir le clamp intégré de la ligne patient pour démarrer le drainage du péritoine

	FICHE TECHNIQUE	NH-FT-023
	MANIPULATION DE DOUBLE POCHE BAXTER	Version 01 du 10/08/2016
		page 2/2
Entité émettrice : POLE MEDECINE D'ORGANES ET CANCEROLOGIE\Néphrologie-hémodialyse		

- **A la fin du drainage, fermer le clamp intégré de la ligne patient**
 - Poser un clamp bleu sur chacune des lignes de la double poche
 - Casser le raccord vert de la poche de remplissage
 - Ouvrir les 2 clamps bleus pour permettre une purge des lignes pendant 10 secondes
 - Re clamber la ligne de drainage avec un clamp bleu
 - Ouvrir le clamp intégré de la ligne patient
-
- **A la fin de l'injection, fermer le clamp intégré de la ligne patient**
 - Poser un clamp bleu sur la ligne d'injection de la poche
 - Contrôler le port du masque (soignant et personne soignée)
 - Effectuer une hygiène des mains avec la solution hydro-alcoolique (2 pressions et 30 secondes de friction – fiche 2-04)
 - Ouvrir l'emballage du bouchon bétadiné
 - Effectuer une hygiène des mains avec la solution hydro-alcoolique (2 pressions et 30 secondes de friction – fiche 2-04)
 - Déconnecter la poche de la ligne Y de la ligne patient
 - Poser le bouchon bétadiné sur la ligne patient.
-
- **Peser la poche drainée avec les deux clamps bleus**
-
- **Noter les différents paramètres sur le cahier de suivi de DPCA**

CYCLE DE VALIDATION		
Rédaction	Vérification	Approbation
<i>Christophe GREGOIRE, Thierry LOBBEZEZ</i> Infirmier(e) (IDE) - CHU\POLE MEDECINE D'ORGANES ET CANCEROLOGIE\Néphrologie-Hémodialyse, Chef de Service - CHU\POLE MEDECINE D'ORGANES ET CANCEROLOGIE\Néphrologie-Hémodialyse 10/08/2016 12:25:15, 10/08/2016 15:07:07	<i>Thierry LOBBEZEZ</i> Chef de Service - CHU\POLE MEDECINE D'ORGANES ET CANCEROLOGIE\Néphrologie-Hémodialyse 10/08/2016 15:12:24	<i>Brigitte COURTOIS (par Caroline SAINT)</i> Directeur - CHU\DIRECTION QUALITE ET DROITS DES PATIENTS 10/08/2016 15:39:23