



Les étapes d'un échange avec Double Poche Baxter

(mise en place de la coquille APRES connexion)

1 Installation du matériel

- Fermer portes et fenêtres
- Nettoyer le plan de travail
- Installer le matériel nécessaire :
 - une potence avec un peson pour poche et un crochet de drainage
 - une double poche réchauffée, poche vide et lignes sur le dessus
 - 2 coquilles bétadinées
 - 2 bouchons de déconnexion (Minicap)
 - 2 clamps pour système déconnectable intégré
 - la solution hydro alcoolique
 - le carnet de suivi
 - 1 masque



Mettre un masque (infirmier et patient)

2

Préparation du matériel

- Se laver les mains
- Enlever le suremballage de la poche sans toucher le protecteur de stérilité
- Effectuer les vérifications d'usage :
 - le nom de la solution,
 - la concentration,
 - le volume,
 - la péremption,
 - l'adhésion du protecteur de stérilité,
 - la limpidité de la poche : la poche peut être humide (condensation liée à la stérilisation),
 - l'intégrité de la poche (en appuyant dessus).



Casser la canule entre les deux compartiments de la poche

- Ouvrir l'emballage de la coquille
- Sortir l'extension de cathéter (Miniset)




3 Connexion



Se désinfecter les mains
(solution hydro alcoolique)


Saisir le Y des lignes d'une main, tirer sur les lignes pour libérer leurs points d'attache et ôter l'embout de stérilité de la poche

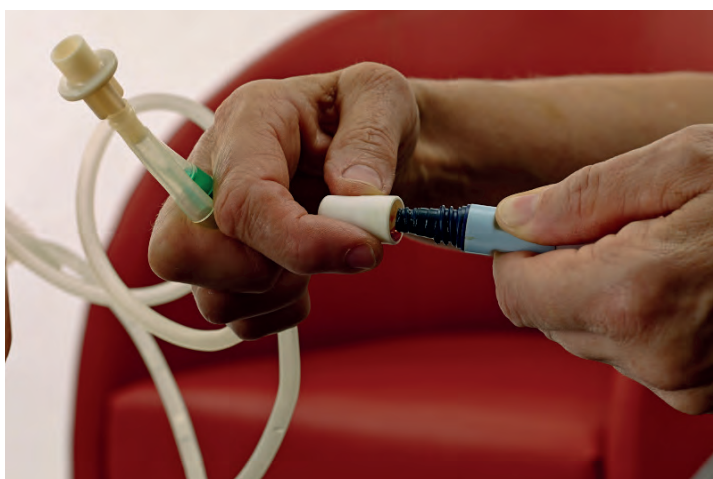


Saisir l'extension de cathéter (Miniset) et dévisser le bouchon bétadiné (Minicap)



Effectuer la connexion en vissant sans vriller le cathéter (c'est la main qui tient les lignes qui visse)

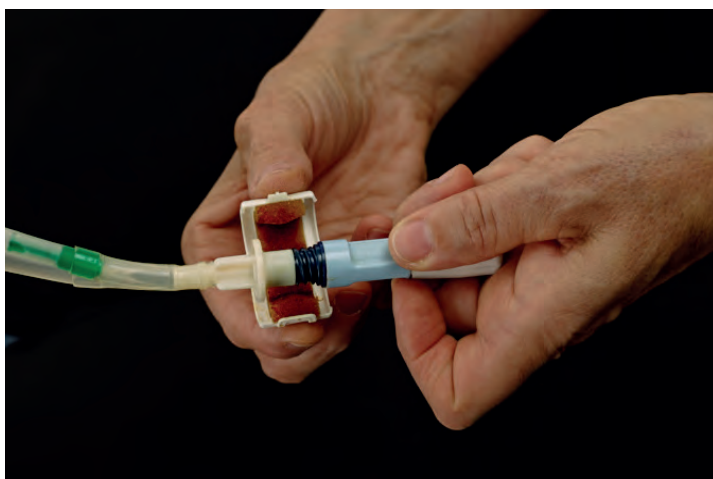

Positionner la collerette de la ligne dans l'encoche de la coquille bétadinée

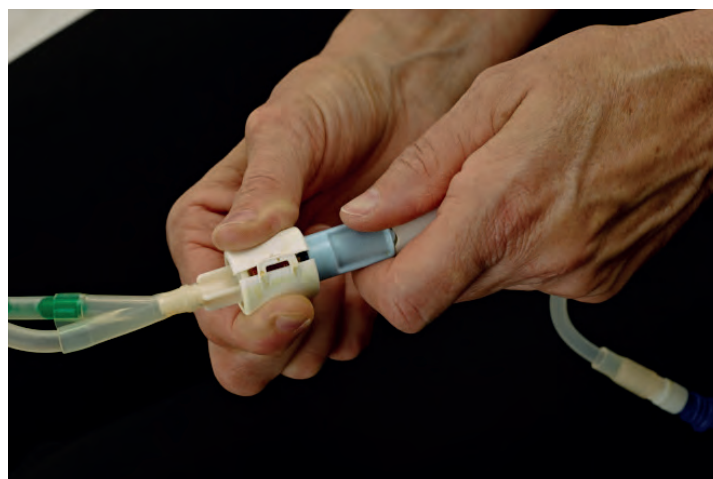

Fermer la coquille bétadinée et la faire pivoter 3 fois



Suspendre la poche pleine au peson
Peser la poche pleine



Mettre la poche vide en position de drainage

4 Drainage


Ouvrir le clamp intégré de l'extension de cathéter (Miniset) : le drainage s'effectue

A la fin du drainage, fermer le clamp intégré du Miniset



Mettre un clamp sur la ligne de drainage

Mirer le dialysat

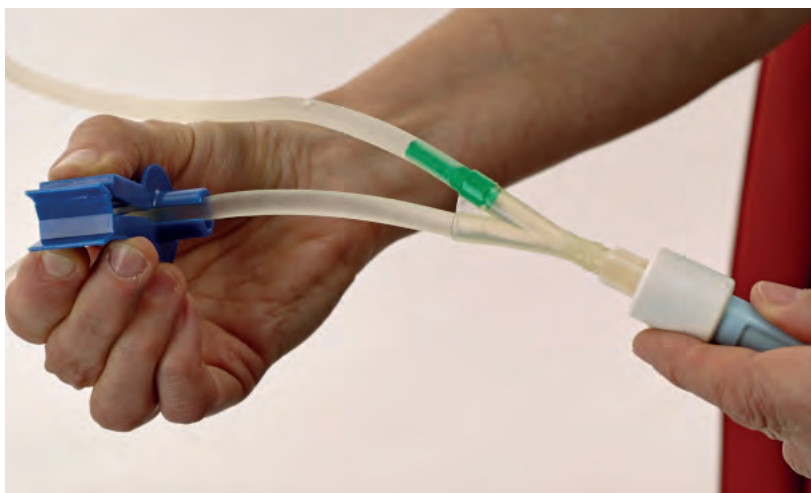

5 Flush


Vérifier que la poche à injecter soit bien reconstituée



Casser la canule sécable de la ligne d'injection



Ouvrir le clamp de la ligne de drainage

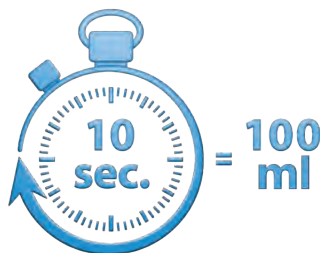

Compter jusqu'à 10 secondes (100 ml) pour rincer et purger les lignes



Fermer le clamp de la ligne de drainage

6 Injection



Ouvrir le clamp intégré de l'extension de cathéter (Miniset) : l'injection s'effectue



A la fin de l'injection, fermer le clamp intégré
Mettre un clamp sur la ligne d'injection

7

Déconnexion



Mettre un masque (infirmier et patient)

Ouvrir l'emballage du Minicap (bouchon)



Se désinfecter les mains (solution hydro alcoolique)



Déconnecter le système en dévissant sans vriller le cathéter (c'est la main qui tient les lignes qui dévisse)



Mettre le Minicap (bouchon)



Ranger votre Miniset (extension de cathéter)

8 Recueil des informations

- Peser la poche drainée
- Noter le poids et l'aspect de la poche drainée dans le carnet de suivi
- Calculer l'ultrafiltration (UF)
- Positionner sur le réchauffeur une poche neuve pour le prochain échange



Ne pas oublier de ranger le matériel, nettoyer le plan de travail et se laver les mains

En Dialyse Péritonéale, il est essentiel de :

- Respecter les règles d'hygiène et d'asepsie
- Manipuler sans précipitation
- Contacter sans délai le centre de dialyse péritonéale en cas de :
 - liquide drainé trouble ou aspect inhabituel
 - douleurs abdominales
 - tout matériel non conforme

Pour tout complément d'information sur les modalités d'utilisation, veuillez consulter la notice d'utilisation des Doubles Poches Baxter.

Si vous ressentez un quelconque effet indésirable, parlez-en à votre médecin ou votre pharmacien ou à votre infirmier/ère. Ceci s'applique aussi à tout effet indésirable qui ne serait pas mentionné dans cette notice. Vous pouvez également déclarer les effets indésirables directement via déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (Ansm) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance Site internet: www.ansm.sante.fr. En signalant les effets indésirables, vous contribuez à fournir davantage d'informations sur la sécurité du médicament. Le fichier utilisé pour vous communiquer le présent document est déclaré auprès de la CNIL. En application des dispositions des articles 34 et suivants de la loi « Informatique et liberté » du 6 janvier 1978 et de ses textes subséquents, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de suppression auprès du Pharmacien responsable de notre laboratoire.

Vous souhaitez nous faire part de vos remarques sur la qualité de la Visite Médicale BAXTER SAS, vous pouvez nous contacter par e-mail à l'adresse : France_affpharm@baxter.com.

Pour toute question d'ordre médical ou pharmaceutique, vous pouvez appeler BAXTER SAS au numéro suivant : 01 34 61 51 41.

Pour plus d'information, veuillez contacter votre représentant Baxter local ou la division Thérapies Rénales : 4 bis rue de la Redoute 78280 Guyancourt, Tél. : +33 1 34 61 50 50, www.baxter.fr.

Baxter est une marque déposée de Baxter International Corp. - Copyright 2016, Baxter Healthcare Corporation, tous droits réservés. FR/MG2/16-0034 - mai 2016